

CHECKLISTE

Um die Test Session für Sie so angenehm und erfolgreich wie möglich zu gestalten, kommen Sie bitte vorbereitet:



Sportschuhe 1-1,5 Nummern größer als üblich, am besten mit Klettverschluss.



Bequeme, weite Hose mit langem Hosenbein, z.B. Jogging oder Trainingshose



Zur Vermeidung von Hygieneunfällen, entleeren Sie bitte Ihre Blase vor dem Termin. Das Stehen und Gehen regt die Blasenfunktion an.



Nicht mit nüchternem Magen kommen, Sie sollten bei Kräften sein



Keine unmittelbar vorangehende und nachfolgende Physiotherapie oder ähnliche Anwendungen, zur Prävention von Überlastung



Bringen Sie das Arztfreigabeformular im Original mit Stempel und Unterschrift des Arztes mit, sowie die Originalunterlagen der Knochendichtemessung

ReWalk™

Robotics
Take the Next Step



ReWalk Personal 6.0 System

ReWalk Robotics GmbH
Leipziger Platz 15, 10117 Berlin


TELEFON +49 (0) 30 2589 5080
E-MAIL kontakt@rewalk.com
www.rewalk.com



Test Session mit dem ReWalk Exoskelett

ReWalk™

Take the Next Step

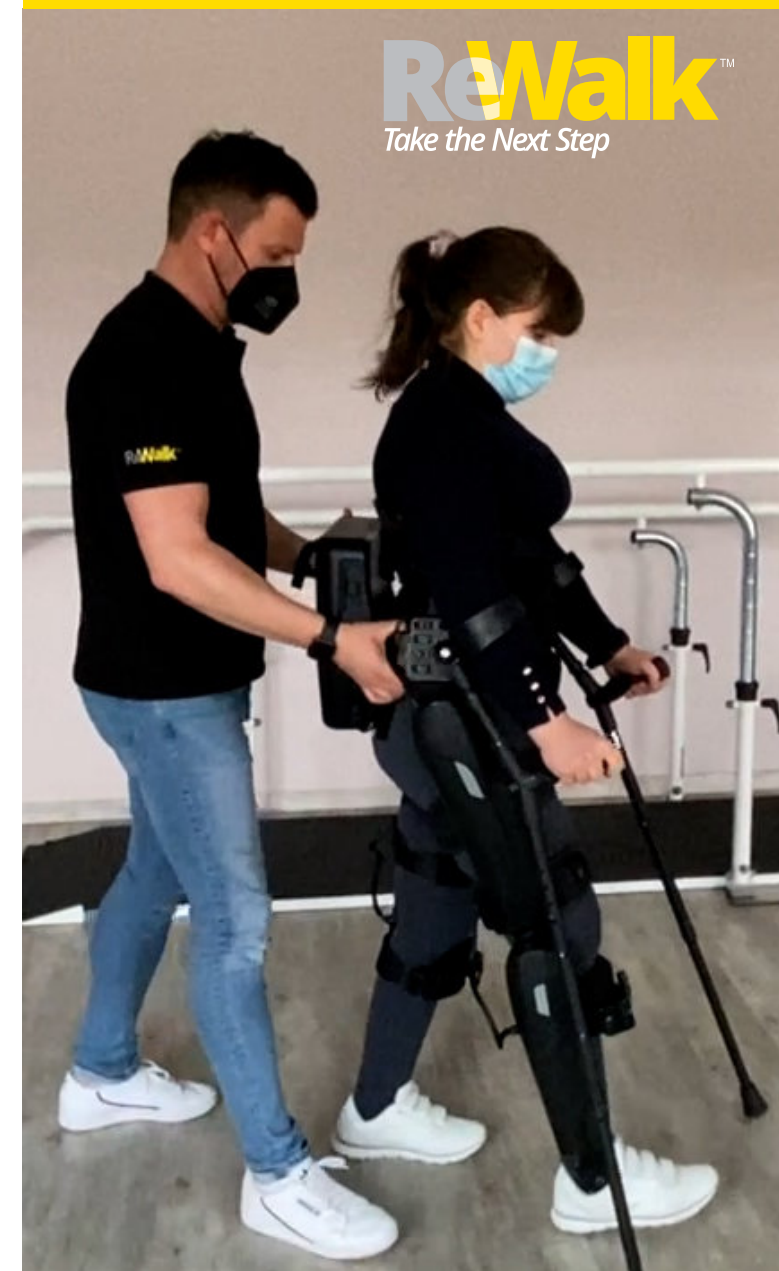

Wie läuft die Test Session ab?


Die Test Session findet unter Anleitung erfahrener ReWalk Physiotherapeuten in Ihrer Physiotherapiepraxis, einem ReWalk Trainingszentrum oder einer Klinik in Ihrer Nähe statt.

- Vermessen der Patientenanatomie¹
- Individuelle Anpassung des ReWalk Systems
- Transfer ins ReWalk System und Fixation
- Aufstehen und Balanceübungen
- Erste Schritte² mit Hilfe erfahrener ReWalk Physiotherapeuten
- Zeitaufwand: ca. 2 Stunden

¹) Hüftbreite, Ober-, Unterschenkelänge, Schuhgröße, Schrittlänge, Knie und Hüftbeugung

²) Bei stabilem Stand und Kreislauf

▼ Test Session 2017

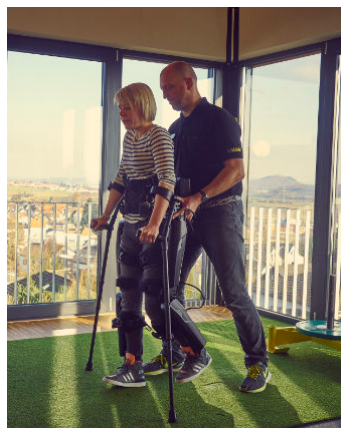

Wie kann ich mich vorbereiten?



Folgende vorbereitende Übungen erleichtern das Stehen und Gehen mit dem ReWalk.

- Forciertes Stehen z.B. im Stehtrainer
- Dehnung des Hüftbeugers, z.B. in Bauchlage
- Übungen zu Verbesserung der Schultergelenksbeweglichkeit
- Transferübungen
- Übungen zur Steigerung der Armkraft und Grundlagenausdauer

Wer kann das ReWalk Exoskelett nutzen?

Das ReWalk Personal 6.0

ist ein am Körper tragbares Roboter-Exoskelett. Es ermöglicht Menschen mit einer Rückenmarksverletzung, durch motorisierte Hüften und Knie wieder aufrecht zu stehen, zu gehen und Treppen zu steigen. Das unabhängige und kontrollierte Gehen im ReWalk ahmt den natürlichen Bewegungsablauf der Beine nach.

ReWalk ist entwickelt für Personen mit:

- kompletter und inkompletter Querschnittlähmung, die sich mit den Händen und Schultern auf Unterarmgehstützen abstützen können.
- einer **Körpergröße** zwischen ca. 160cm - ca. 190cm
(Dies ist abhängig von der Beinlänge:
Unterschenkelänge 43,5 bis 56cm
Oberschenkelänge: 36 bis 48,5cm)
- Personen mit einem **Gewicht** bis zu 100kg

Auch andere Faktoren wie **Knochendichte** und Bewegungsumfang müssen berücksichtigt werden und sind Teil der Voruntersuchung.

